


NOTA TÉCNICA Nº 01/2016

Ementa: *Orientação para coleta e envio de amostras para Pesquisa Laboratorial da Infecção pelo HIV no Lacen/PR*

Visando orientar as Regionais de Saúde e outros locais que encaminham amostras ao Lacen/PR, informamos que:

1. O diagnóstico da infecção pelo vírus HIV deverá ser realizado na Unidade de Atendimento com o uso de Testes Rápidos ou no Laboratório Local utilizando um dos fluxos do Manual Técnico para Diagnóstico da Infecção pelo HIV, 2ª edição 2014, do Ministério da Saúde.
2. Para diagnósticos não conclusivos na Unidade de Atendimento ou no Laboratório Local, encaminhar amostras para o Lacen/PR, conforme abaixo:
 - 01 amostra de soro, mínimo 1 mL.
 - 01 amostra de plasma recém coletada. Encaminhar no próprio Tubo Preparador de Plasma – Tubo PPT (tampa pérola), fornecido pelo Lacen/PR.
 - Efetuar 01 cadastro no GAL com a inclusão das 2 pesquisas:
 - Pesquisa HIV Confirmatório (Sorologia) – Lacen/PR;
 - Pesquisa HIV Confirmatório (Biologia Molecular) – Lacen/PR.
 - Preencher corretamente todos os campos do cadastro do GAL, inclusive os dados clínicos dos pacientes.
 - Informar, obrigatoriamente, os resultados obtidos na Unidade de Atendimento ou no Laboratório Local, no campo “Observações” da requisição do GAL ou impressos.

São José dos Pinhais, 10 de maio de 2016.

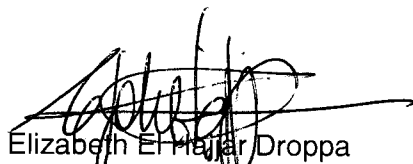

Elizabeth El Hajjar Droppa

Chefe da Divisão dos Laboratórios de
Epidemiologia e Controle de Doenças
Lacen/PR



Juliana Neves Bachim

Farmacêutica da Seção de Imunologia
Lacen/PR