

NOTA TÉCNICA Nº 02/2013

Ementa: *Orientação para solicitação e envio de amostras para Pesquisa de Vírus Respiratórios por metodologia de Biologia Molecular no Lacen/PR*

Visando orientar as Regionais de Saúde e outros locais que enviam amostras para o Lacen/PR, e tendo em vista o seu papel como Laboratório de Referência em saúde pública, seguem as informações e os procedimentos a serem adotados:

A Pesquisa dos Vírus Respiratórios por metodologia de Biologia Molecular foi implantada para atender os casos de Surtos de Infecção Respiratória e dois programas do Ministério da Saúde – MS, conforme descrito abaixo e fluxograma em anexo:

- a) Casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), notificados no SINAN.
- b) Monitoramento ampliado dos Vírus Respiratórios (Programa SIVEP-Gripe), conforme requisitos exigidos na Portaria Nº 2693/MS, republicada em 26/04/2012.

AMOSTRAS DE SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG)

- Notificar o caso de SRAG no SINAN;
- Cadastrar a amostra no GAL, incluindo na requisição:
 - Campo “Finalidade” a opção “Programa”;
 - Campo “Descrição” a opção “SRAG Universal”.

AMOSTRAS DO PROGRAMA SIVEP-GRIPE – VIGILÂNCIA DE SÍNDROME GRIPAL

- Preencher a Ficha de Notificação Individual do SIVEP-Gripe;
- Cadastrar a amostra no GAL, incluindo na requisição:
 - Campo “Finalidade” a opção “Programa”;
 - Campo “Descrição” a opção “Unidade Sentinela de Influenza – Síndrome Gripal”.

AMOSTRAS DO PROGRAMA SIVEP-GRIPE – VIGILÂNCIA DE SRAG - UTI

- Preencher a Ficha de Notificação Individual do SIVEP-Gripe;
- Cadastrar a amostra no GAL, incluindo na requisição:
 - Campo “Finalidade” a opção “Programa”;
 - Campo “Descrição” a opção “Unidade Sentinela de Influenza – SRAG”.

PARA AMBOS OS PROGRAMAS (SRAG E PROGRAMA SIVEP-GRIPE)

- Solicitar a Pesquisa
 - Pesquisa de Vírus Respiratórios

- Coletar uma das amostras a seguir:

AMOSTRA	OPÇÃO NO GAL
Swab de orofaringe e nasofaringe	Secreção orofaringe e nasofaringe
Aspirado de nasofaringe	Aspirado de nasofaringe
Aspirado de traquéia	Aspirado traqueal
Lavado bronco-alveolar	Lavado brônquico alveolar

- Acondicionar as amostras em Meio de Transporte Viral, fornecido pelo Lacen/PR.
- Enviar as duas fichas (GAL e SINAN ou GAL e Ficha SIVEP-Gripe) juntamente com a amostra ao Lacen/PR em caixa de isopor com gelo reciclável;
- Caso não seja possível o envio no mesmo dia da coleta, a amostra poderá ser congelada (congelador, freezer) e transportada ao Lacen/PR no prazo máximo de 5 dias. Salientamos que neste caso o transporte em caixa de isopor deverá conter gelo reciclável suficiente para garantir o transporte ao Lacen/PR sem o descongelamento das amostras.

Observação:

- a) O Lacen/PR disponibiliza swab de rayon e Meio de Transporte Viral para a coleta de oro e nasofaringe. Não serão fornecidos bronquinhos.
- b) O envio da amostra em Meio de Transporte Viral é obrigatório a fim de preservar o vírus para cultivo celular, se necessário.


No caso do recebimento de amostras sem esses requisitos será realizada apenas a Pesquisa do Vírus Influenza.

São José dos Pinhais, 01 de Outubro de 2013.

Elizabeth El Hajjar Droppa
Chefe da Divisão dos Laboratórios de
Epidemiologia e Controle de Doenças
Lacen/PR

Maria do Carmo Debur Rossa
Seção de Biologia Molecular
Lacen/PR

FLUXOGRAMA DE PROCEDIMENTOS PARA PESQUISA DE VÍRUS RESPIRATÓRIOS NO LACEN/PR

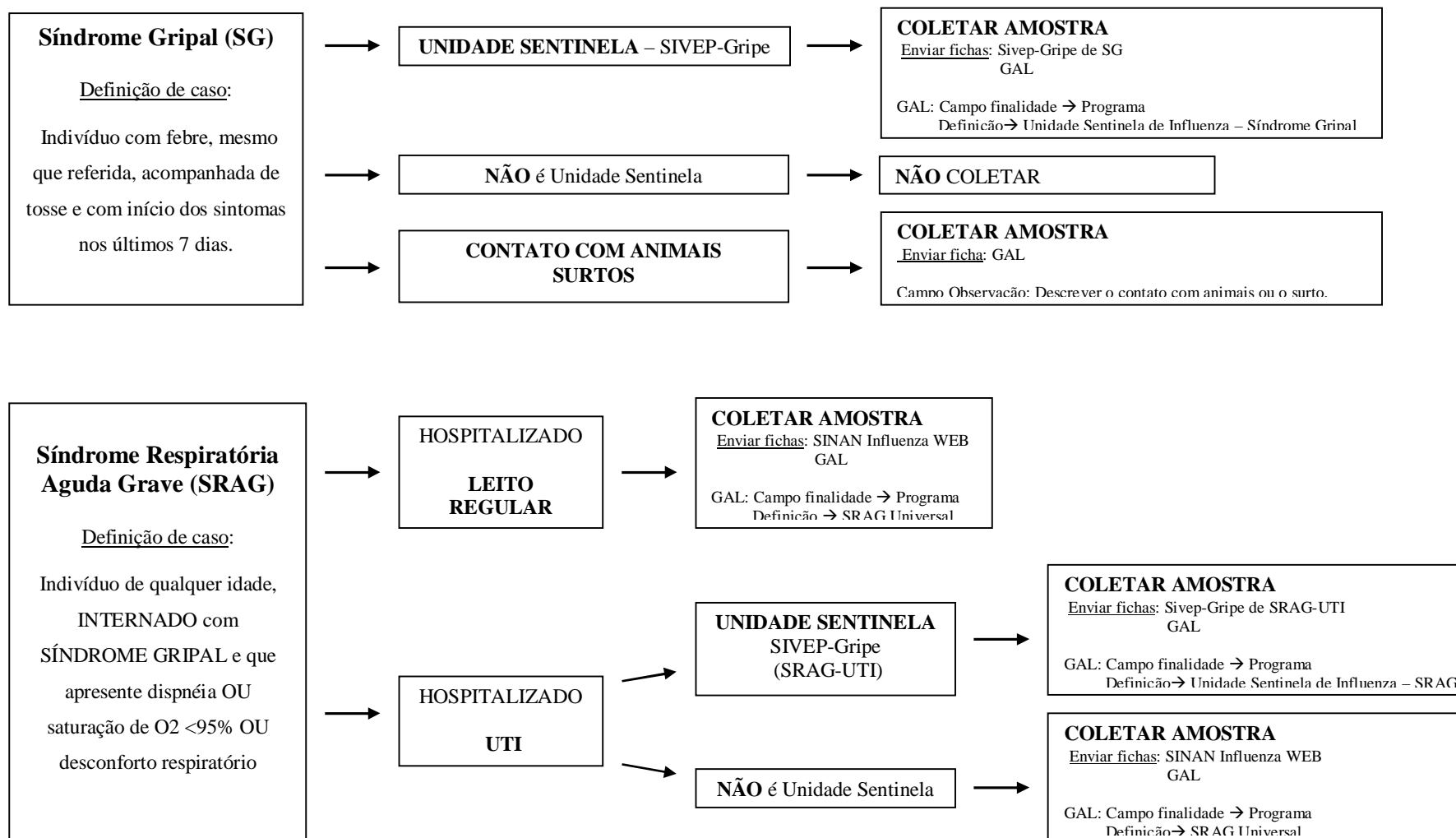

LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DO PARANÁ
UNIDADE GUATUPÊ